


AED使用時の注意事項！

傷病者が以下のような状態であること。

- 意識がない。
- 呼吸がない
- 8歳以上(25kg以上)である。
(8歳未満、25kg以下の場合は小児用電極を使用してください)

使用時には・・・

- 電極は、皮膚にしっかりと密着させる
- 汗などの水分は、タオルでしっかりと拭く
- ペースメーカやICD(植込み型除細動器)から、3cm以上離して電極を貼る
- 胸毛の濃い場合、まず電極を貼ってみて心電図の解析が始まるかを確認する。解析が始まらない場合は剃毛する
- 電極を貼る位置に湿布や医薬品がある場合、剥がして薬剤を拭き取る。
- アクセサリーは、簡単に外せるものは外し、それ以外は電極の下に入らないようにする。
- 解析中・放電時には、傷病者に触れないこと。
- 傷病者が回復した場合、電極はつけたまま、電源ONの状態ですぐ救急隊の到着を待つこと。

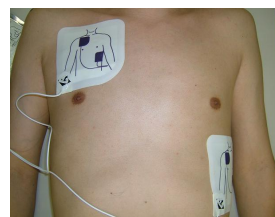

緊急時には、本学『ERセンター』へ！
PHS：69999
外線：03-5803-0099